



professionisti nel controllo dei rischi infettivi

La salute è una cosa seria ed il tuo bene più prezioso

	DISINFETTANTE	COMPOSIZIONE	PREPARAZIONE	MODALITA' D'USO	TEMPI DI CONTATTO	ATTIVITA'			
						Battericida	Virucida	Fungicida	Sporicida
STRUMENTI	Viroxide INSTRUMENTS	De-ionised water, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1, 3-diamine, Tetrasodium N, N bis (Carboxylatomethyl)-L-glutamate, Didecyltrimethylammonium chloride, ethanol, C12-15 parath-9, Monoethanolamine, Potassium carbonate, Benzotriazole, PERACETIC ACID.	CONCENTRATO - Adatto in Vasche ad Ultrasuoni e Multisteril Soluzione al 2% o al 4%. Aggiungere 20 ml in 1 litro di acqua pulita (2%). Utilizzare una soluzione al 4% per articoli molto sporchi.	Il tempo minimo d'immersione è 5 minuti. Il tempo d'immersione raccomandato è 15 minuti. Dopo la disinfezione, sciacquare abbondantemente gli strumenti. Soluzione stabile una settimana Rinnovare la soluzione giornalmente se sono presenti segni di sporcizia.	Tuberculocida, sporicida, virucida, battericida, fungicida, HIV, HBV, HCV 5 minuti	✓	✓	✓	✓
	SPORIGERM PERACETIC PLUS	Tetracetilendiidiammina, Sodio Perborato Monoidrato Coformulanti	CONCENTRATO - Diluire in acqua tiepida (35°C). Versare 2 misurini di polvere (16 gr) per litro d'acqua. Mescolare fino ad ottenere una soluzione limpida di colore blu chiaro. Attendere 15 minuti. La soluzione resta attiva per un massimo di 24 ore dalla preparazione.	Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con prelavaggio utilizzando un detergente appropriato. Immergere gli strumenti nella soluzione per almeno 10 minuti. Sterilizzazione a freddo immergere di nuovo gli strumenti nella soluzione per 10 minuti. Rimuovere gli strumenti e risciacquare con acqua sterile. Per la conservazione asettica utilizzare un prodotto appropriato.	Sterilizzazione..... 10 minuti Tuberculocida, sporicida, virucida, battericida, fungicida, HIV, HBV, HCV 5 minuti	✓	✓	✓	✓
	SPORIGERM FERRI	Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, Alchilisochinolina Bromuro, Eccipienti detergenti e acqua deionizzata	CONCENTRATO - Adatto in Vasche ad Ultrasuoni e Multisteril Diluire in acqua, col misurino in dotazione, in concentrazioni dell'1% o 5% a seconda del grado di disinfezione e del tempo di contatto desiderato.	Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. Risciacquare abbondantemente con acqua Soluzione stabile una settimana Rinnovare la soluzione giornalmente se sono presenti segni di sporcizia.	Diluiz. 1% Diluiz. 5% Virus HIV - HBC - HCV 1 ora 5 minuti Micotubercolo Tuberculare TBC..... 5 minuti 5 minuti Funghi 15 minuti 5 minuti Batteri 5 minuti 5 minuti	✓	✓	✓	
SUPERFICI	Viroxide SPRAY	Aqua, Benzalkonium Chloride, C12-14 Alkyl Ethylbenzylammonium Chloride, Didecyltrimethylammonium Chloride, Isopropyl Alcohol, C9-11 Parath-8, Peracetic acid, PPG-2 Methyl Ether, Polyaminopropyl-Biguanide, Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA	CONCENTRATO - Cartucce predosate 1. Riempire il contenitore con 500 ml d'acqua. 2. Inserire 1 cartuccia nel collo del contenitore. 3. Inserire lo spruzzatore nel contenitore facendo passare il tubo attraverso la cartuccia e avvitare. 4. Agitare delicatamente il contenitore per pochi secondi.	Spruzzare il disinfettante su superfici e oggetti da una distanza di circa 30 cm in modo da inumidirli completamente. Lasciare agire per almeno 30 secondi. Far asciugare lo spray o strofinare con un panno o con salviette asciutte.	Tuberculocida, sporicida, virucida, battericida, fungicida, HIV, HBV, HCV 5 minuti	✓	✓	✓	✓
	SPORIGERM SPRAY	Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi, Isotiazolinone, Mg Cloruro, acqua depurata q. b. a	PRONTO ALL'USO Montare il nebulizzatore sul flacone	Nebulizzare a 15/20 cm di distanza direttamente sull'oggetto da detergere o disinfectare. Verificare che la superficie sia ben umida. Lasciare agire per almeno 5 minuti. Asciugare con un panno o carta monouso.	Virus HIV - HBV - HCV 1 minuto Micotubercolo Tuberculare TBC..... 5 minuti Funghi e batteri 5 minuti	✓	✓	✓	
	SD 10 ALCOHOL SPRAY	Ethanol, Propan-2-ol, Polymeric biguanide hydrochloride, Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene	PRONTO ALL'USO Montare il nebulizzatore sul flacone	Spruzzare il disinfettante su superfici e oggetti da una distanza di circa 30 cm in modo da inumidirli completamente. Lasciare agire per almeno 30 secondi, facendo asciugare lo spray o strofinando con un panno o carta monouso.	HIV, HCV, TB, virucida, battericida, fungicida 5 minuti	✓	✓	✓	
	SPORIGERM FAZZOLETTI	Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi, Isotiazolinone, Mg Cloruro, acqua depurata	PRONTO ALL'USO Flow Pack	Strofinare sulle superfici, sugli oggetti e sugli strumenti da pulire e da decontaminare assicurandosi che siano completamente inumiditi. Lasciare agire per almeno 5 minuti.	Virus HIV - HBV - HCV 1 minuto Micotubercolo Tuberculare TBC..... 5 minuti Funghi e batteri 5 minuti	✓	✓	✓	
	SD 20 ALCOHOL WIPES	Ethanol, Propan-2-ol, Polymeric biguanide hydrochloride, Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene	PRONTO ALL'USO Rimuovere il coperchio del dispenser. Tagliare la busta nella parte superiore. Introdurre la salvietta attraverso il foro centrale, rimettere il coperchio ed estrarre la salvietta.	Usando una nuova salvietta per ogni applicazione, strofinare gli oggetti da disinfectare in modo da inumidirli completamente. Lasciare agire almeno 30 secondi facendo evaporare.	HIV, HCV, TB virucida, battericida, fungicida 5 minuti	✓	✓	✓	
RETE IDRICA	Viroxide ASPIRATOR	Didecyltrimethylammonium chloride, Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, Isopropanol (Propan-2-ol), Ethanolamine (2-Aminoethanol), N-(3-aminopropyl) -N-dodecylpropane-1,3-diamine, Peracetic Acid	CONCENTRATO Soluzione al 2%. Aggiungere 20 ml per ogni litro di acqua pulita.	Aspirare ogni giorno almeno 1 litro di soluzione attraverso le cannule di aspirazione. Versare anche 500ml di soluzione nella sputacchiera. Lasciare agire per almeno 10 minuti. Risciacquare con acqua pulita.	Sporicida, virucida, battericida, fungicida, tuberculocida HIV, HBV, HCV 10 minuti	✓	✓	✓	✓
IMPRONTE	AMUCHINA MD	Principio attivo: Ipoclorito di sodio (Cloro Attivo; 11.000 ppm) Eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato, Acqua depurata	CONCENTRATO Diluire al 5% o al 10% usando il tappo dosatore.	Per disinfectare impronte in alginate si consiglia la concentrazione al 10% per ridurre il tempo di immersione. Sostituire quotidianamente la soluzione.	Sporicida, virucida, battericida, fungicida, tuberculocida Pura 1 minuto Diluizione 10% 5 minuti Diluizione 5% 15 minuti	✓	✓	✓	✓
AMBIENTE	Viroxide AIR	Benzalconio cloruro, Bifenil-2-olo, Propan-2-olo, Profumo, Propellenti	PRONTO ALL'USO Flacone nebulizzatore	1. Pulire a fondo le superfici da disinfectare utilizzando un opportuno detergente. 2. Chiudere le finestre e le porte dell'ambiente in cui si effettua l'operazione. 3. Posizionare una o più bombole spray al centro dell'ambiente da disinfectare. 4. Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo, per consentire lo svuotamento totale. Uscire dalla stanza e chiudere la porta. 5. Attendere lo svuotamento della bombola e lasciare agire per 15 minuti. 6. Aprire le finestre e le porte per aerare.	15 minuti dal completo svuotamento del flacone	✓		✓	
MANI	SPORIGERM MANI	Cloruro di alchil-benzil-dimetil-ammonio, 2-idrossi-difenil, Profumo Glicerina: Alcanolammide Poliglicoletere, Alchilpoliglicoletere, Acqua deionizzata	PRONTO ALL'USO Sapone	Inumidire le mani, aggiungere circa 5 ml di sapone e lavarle a lungo. Risciacquare con acqua corrente. Interventi Chirurgici Prima e dopo, eseguire un lavaggio prolungato per circa 2 minuti. Usare uno spazzolino per pulire a fondo le unghie, poi risciacquare.	30 Secondi Chirurgia 2 minuti	✓	✓	✓	
	Sterisol	Propan-2-ol, 1-Propanol	PRONTO ALL'USO	Utilizzare tra un paziente e l'altro, per detergere, disinfectare e idratare le mani.	Chirurgia 2 minuti	✓	✓	✓	
	AMUCHINA gelXgerm	Alcool etilico denaturato, Eccipienti e acqua depurata	PRONTO ALL'USO Gel senz'acqua	Utilizzare tra un paziente e l'altro, per detergere, disinfectare e idratare le mani. Il gel si utilizza senz'acqua. Distribuire il prodotto direttamente sulle mani e frizionare il gel su tutta la superficie delle mani. Lasciare agire per 30 secondi.	30 Secondi	✓	✓	✓	