

# SPORIGERM PERACETIC PLUS

DISINFETTANTE STERILIZZANTE A FREDDO

DISPOSITIVO MEDICO CE n° 0546

**COMPOSIZIONE:**

**100 grammi di prodotto contengono:**

Tetracetilendiammina.....g.	25,00
Sodio Percarbonato .....	.g. 52,00
Coformulanti q.b. a.....g.	100,000

**ASPETTO:**

Polvere fine bianca.

**ODORE:**

Caratteristico

**ATTIVITA':**

SPORIGERM PERACETIC PLUS è uno sterilizzante a freddo: l'acido peracetico che si forma dalla reazione dell'acqua ossigenata (che si ottiene dopo dissoluzione del prodotto in acqua) e tetracetilendiammina esplica una efficace attività biocida nei confronti di spore, virus (HIV,HBV,HCV), batteri, mycobacteri e funghi.

Alle concentrazioni indicate (1,6%) esercita l'azione sterilizzante dopo un tempo di 10 minuti di contatto.

Il prodotto può essere utilizzato disinfettante/ decontaminante anche a concentrazioni dimezzate (0,8%) la sua azione si esplica dopo 10 minuti di contatto.

Il prodotto è attivo dopo 15 minuti dalla dissoluzione, la soluzione così preparata è attiva per un tempo massimo di 24 ore.

Dai tests effettuati si dimostra che il prodotto è efficace anche in presenza di materiale organico, ma è buona norma immergere i dispositivi previamente detersi con apposito detergente, meglio se a base enzimatica.

**INDICAZIONI D'USO:**

SPORIGERM PERACETIC PLUS per le sua caratteristiche è indicato per una sterilizzazione e/o disinfezione rapida a freddo di: endoscopi, fibre ottiche, strumenti chirurgici e odontoiatrici, trasduttori, ecc.

Può essere utilizzato anche con lava endoscopi automatici ecc

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

- 1) Preparare la quantità d'acqua potabile (di rubinetto) tiepida nella apposita vaschetta, controllare che la temperatura sia intorno a 35 °C.
- 2) Versare (con l'apposito misurino dosatore) circa gr 16 di polvere per litro d'acqua (oppure 1 bustina per litro d'acqua).
- 3) Mescolare la soluzione fino ad ottenere una soluzione limpida di colore blu chiaro.
- 4) Attendere 15 minuti prima di usare la soluzione
- 5) Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con prelavaggio utilizzando un detergente appropriato.
- 6) Immergere gli strumenti nella soluzione di SPORIGERM PERACETIC PLUS per almeno per 10 minuti.
- 7) Rimuovere gli strumenti e risciacquare in acqua sterile.

**VALIDITA' E**

**CONSERVAZIONE:**

Il prodotto ha una validità 2 anni dalla data di preparazione se conservato nella confezione integra sigillata.

Il prodotto teme l'umidità.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

**TOSSICITA':**

SPORIGERM PERACETIC PLUS alla concentrazione d'uso non presenta alcuna controindicazione per la persona e l'ambiente.

L'agente attivo "acido peracetico" se ingerito, è solo moderatamente tossico (acido peracetico DL 50 = 1540 mg/kg). SPORIGERM PERACETIC PLUS alla concentrazione d'uso non presenta alcuna controindicazione per la persona e l'ambiente.

L'agente attivo "acido peracetico" se ingerito, è solo moderatamente tossico (acido peracetico DL 50 = 1540 mg/kg).

La polvere può essere irritante per gli occhi: In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Alle normali concentrazioni operative non ha effetti corrosivi o irritanti sulla cute.

La polvere può essere irritante per gli occhi: In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Alle normali concentrazioni operative non ha effetti corrosivi o irritanti sulla cute.

**IMPATTO  
AMBIENTALE:**

Il residuo a contatto con le acque di scarico, si degrada immediatamente in acido acetico, acqua e ossigeno, agenti non considerati nocivi o inquinanti per l'ambiente. Pertanto le soluzioni d'impiego esauste non necessitano trattamenti particolari per lo smaltimento e possono essere riversate tranquillamente nella rete fognaria.

**AVVERTENZE:**

La soluzione è attiva dopo 15 minuti dalla completa dissoluzione della polvere, e resta attiva per un massimo di 24 ore dalla preparazione.



Nocivo

R22 Nocivo per ingestione

R38 Irritante per la pelle.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

FRASI S:

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S 22 Non respirare la polvere.

S 25 Evitare il contatto con gli occhi

S 26 in caso di contatto con gli occhi sciacquare subito ed interpellare immediatamente il medico.

Non usare per strumenti in lega di alluminio e Nichel

Contiene Sodio Percarbonato

**AUTORIZZAZIONE:**

Dispositivo Medico classe II b CE 0546 secondo direttiva CEE 93/42, come emendata dalla direttiva 2007/47/CEE.

**CONFEZIONI:**

Barattolo da gr 500 in scatole da 2 pezzi.

Dimensione scatola: 225x115x158

Bancale da 180 scatole (6 strati da 30 scatole)

CODICE PRODOTTO: 502002

**DISTRIBUTORE:**

**International Dental Supply Srl**  
**Via Valletta San Cristoforo, 28/10 – Savona**  
**Tel 019.862080 – fax 019.2304865**  
**www.idsdental.it info@idsdental.it**

**FABBRICANTE:**

Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi)