



INLINE HOME BLEACHING

Istruzioni per l'uso

B.M. Dentale S.a.s. –Torino – Italy
www.bmdentale.com

INLINE HOME BLEACHING

Con il kit sbiancante domiciliare **INLINE HOME BLEACHING** potete sbiancare i vostri denti in modo efficace e sicuro senza danneggiare la struttura dei denti. Lo sbiancamento avviene in modo efficace sui denti vitali, mentre corone, ponti e restauri non avranno lo stesso risultato. Si raccomanda una seduta **d'igiene dentale** prima dell'utilizzo del prodotto. I denti dovrebbero essere in buono stato, senza carie, fessure e microfratture. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio dentista.


Il trattamento può essere fatto di notte, durante il sonno, o di giorno con applicazioni da 2 a 3 ore.

Il trattamento dovrebbe essere ripetuto per 5–10 giorni.

Nella tabella di seguito, sono rappresentati i tempi di applicazione consigliati. È possibile utilizzare tempi più lunghi per ogni seduta, e ridurre il numero delle stesse. In caso di sensibilità si raccomanda un numero maggiore di applicazioni più brevi e, possibilmente, una minore concentrazione di Perossido di Carbamide. Si consiglia di effettuare un trattamento di fluorizzazione in caso di sensibilità dentinale post sbiancamento.

Concentrazione di Perossido di Carbamide	Tempo minimo di applicazione	Tempo di applicazione consigliato	Risultato ottimale in:	Indicazioni
16%	1 ora	3 ore o durante la notte	4–8 applicazioni	Sbiancamento leggero-medio denti sensibili


Preparazione del tray (mascherina)

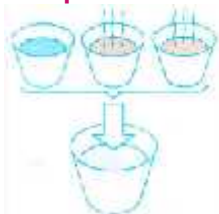

1. Portare ad ebollizione 2 bicchieri di acqua. Aggiungere un bicchiere di acqua fredda per ottenere così una temperatura di 65-70°C.



2. Immergere la mascherina nell'acqua per 10-12 secondi fino ad ammorbidirla.

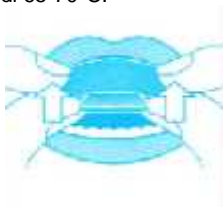


3. Rimuove il residuo di acqua applicare la mascherina ancora morbida sui denti per ottenere lo stampo aiutandosi con le dita come in figura.



4. Dopo circa 2 minuti rimuovere con cura la mascherina. Una volta Risciacquato in acqua fredda sarà pronto per l'utilizzo.

Come ottenere il massimo risultato

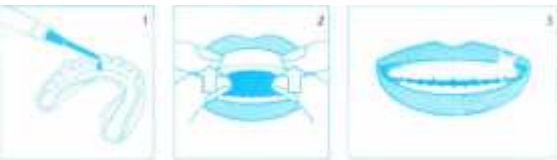

-) Lavare i denti e passare il filo interdentale.
-) Prendere dal kit una siringa e rimuovere il cappuccio.
-) Mettere una piccola goccia di **INLINE HOME BLEACHING Gel** per ogni spazio dentale nella mascherina (Immagine 1). Mettere la mascherina sull' arcata dentale (Immagine 2). Una siringa riempie approssimativamente 6–8 mascherine.
-) Dopo lo sbiancamento, rimuovere le mascherine, sciacquare e spazzolare il gel in eccesso dai denti e dalle gengive.

-) Sciacquare la mascherina con acqua fredda e pulirla con uno spazzolino da denti.
-) Per almeno 4 ore dopo lo sbiancamento, astenersi dal consumare the, caffè, vino rosso, sigarette ecc..., per evitare che gli effetti del trattamento siano ridotti.

Possibili effetti collaterali

Sensibilità dei denti, irritazione delle gengive, nausea, mal di testa. I sintomi sono temporanei e dovrebbero cessare in 1–3 giorni dall'ultimo utilizzo del prodotto.

Avvertenze

Evitare il contatto con l'interno della bocca, occhi e pelle. In caso di contatto accidentale, sciacquare la parte coinvolta con acqua abbondante. Nel caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e richiedere assistenza medica. INLINE non consiglia il trattamento sbiancante a donne incinta, in allattamento o persone di età inferiore a 18 anni.

Conservare in luogo fresco ed al riparo dalla luce. Avvertimento: tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

B.M. Dentale S.a.s. –Torino – Italy
www.bmdentale.com